




THE MORE YOU  
**CAN SEE,**  
 THE MORE YOU  
**CAN DO**

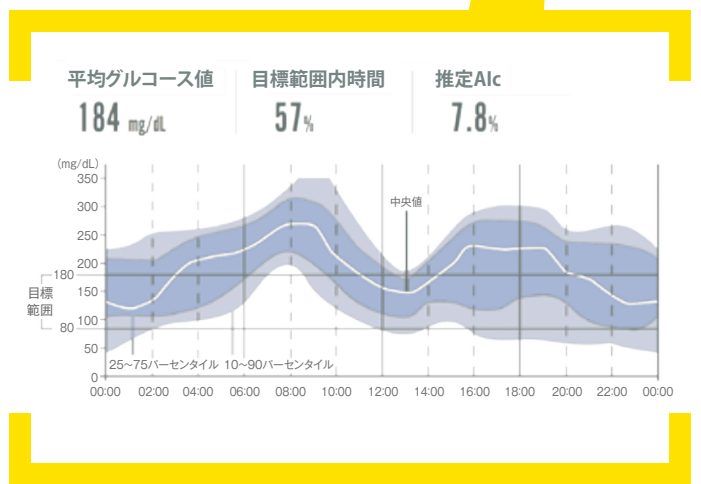

FreeStyle  
 リブレ Pro

**Abbott**

# 詳細なグルコースデータの入手・解析をより簡便に

## FreeStyleリブレProシステム

### センサー (使いすて)



出荷時校正済、  
使用時の血糖自己測定による校正は必要ありません。

- 最長14日間、持続的に測定し、  
15分毎にグルコース値を自動的に記録
- 耐水性\*で、患者さんがアクティブな生活を送れるよう設計  
※水深1メートルで最長30分間の耐水性試験を実施済みです。

### Reader



1台のReaderで  
複数の患者さんに使用可能。

- 14日分の測定結果の  
読み取り時間は5秒以内

## 最長14日間、信頼性の高い血糖プロフィールを得るための3ステップ



1 装着  
上腕後部にFreeStyle  
リブレProセンサーを  
貼りつけ、起動します。

- 装着、起動は非常に簡単です。

2 データ読み取り  
センサーをReaderで  
スキャンし、グルコース値の  
測定結果を読み取ります。


3 レポート作成  
ReaderをPCに接続し\*  
FreeStyleリブレPro  
ソフトウェアでレポートを  
作成します。

\*付属のUSBケーブル経由

## 隠れていた高血糖、低血糖を把握できるグルコース変動レポート


### HbA1c

過去1~2か月間の平均血糖値を反映

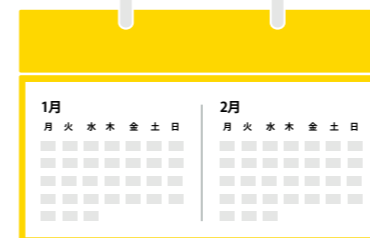


### SMBG

測定した時点の血糖値のみ把握

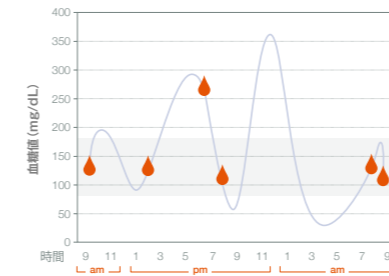

### AGP\*


グルコースプロフィールをわかりやすく表示

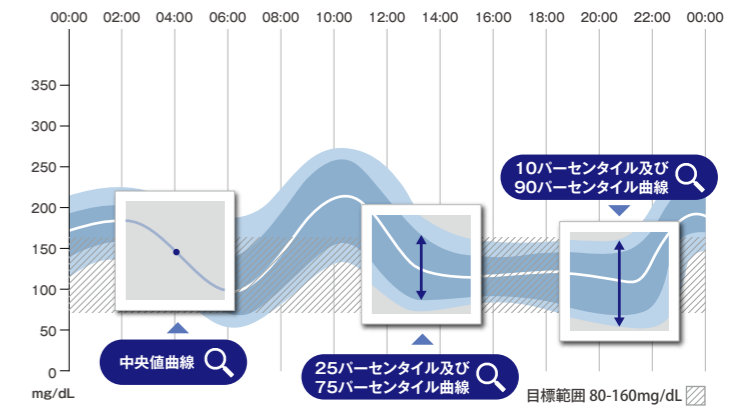

FreeStyleリブレProソフトウェアを活用することで、  
14日間にわたる日中および夜間のグルコース変動  
レポートを簡単に作成することができます。

\*Ambulatory Glucose Profile

## ケースレポート

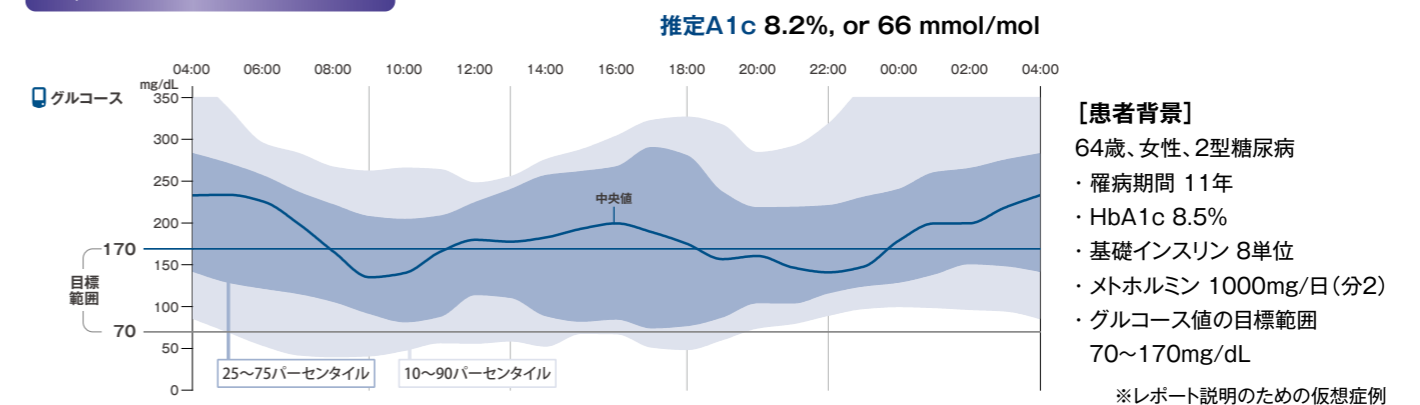

Q グルコース値は目標範囲内にありますか?

A ほとんどが目標値より上です。

Q グルコース値の日内変動はありますか?

A 日中の中央値曲線は比較的平坦ですが、夜間から朝方にかけてのグルコース変動が大きいことがわかります。

Q 低グルコースのリスクはありますか?

A 10パーセンタイル値(下の薄い青色で示した範囲の下部分)が目標値より下であり、朝から昼にかけてと、夕方に低グルコースのリスクがあります。

Q グルコース値の日差変動はありますか?

A 25~75パーセンタイル(濃い青色で示した範囲)が24時間を通じて幅広く、低グルコースおよび高グルコースのリスクがあることが示されます。

# FreeStyle **リブレ** Pro

フラッシュグルコースモニタリングシステム

## 【製品情報】

### ●センサー/アプリケーター (同梱)

承認番号: 22800BZX00227000



製品番号	75165-01
JAN コード	4987439084237
包装単位	1個
希望小売価格	6,380円(税抜)

### ●Reader

承認番号: 22800BZX00227000



製品番号	71608-01
JAN コード	4987439084220
包装単位	1台
希望小売価格	7,089円(税抜)

## 【データ管理ソフト】

### FreeStyle **リブレ** Pro ソフトウェア仕様

【システム要件】 2016年10月現在

- ▶ Microsoft Windows 7 (32 または 64 bit)
- ▶ Microsoft Windows 8 (32 または 64 bit)
- ▶ Microsoft Windows 10 (32 または 64 bit)
- ▶ OS X El Capitan

- 接続には測定器本体に付属のケーブルをご使用ください。
- USB2.0/ハブ、1.6GHzデュアルコアプロセッサ、2GB RAM以上が搭載されたコンピュータが必要です。PDF形式のレポートを表示するため、Adobe® Readerが推奨されます。
- 測定器データのコンピュータへの保存は、PDF形式(レポート画面)もしくはテキストファイル形式でのみ行なうことができます。本ソフトウェア内には記録されません。

### ダウンロードサイト

<http://myfreestyle.jp>



FreeStyle  
**リブレ** Pro

[FreeStyleリブレProシステム: 製造販売元]

**アボット ジャパン株式会社**  
千葉県松戸市松飛台 278

[FreeStyleリブレProソフトウェア]

**アボット ジャパン株式会社**  
本社 / 東京都港区三田 3-5-27

お客様  
相談窓口

**0120-37-8055**

**Abbott**

© 2016 Abbott DOC35473 JP\_Rev. A 10/16